

## Notice technique

Réf. : **TB-17001-FRE**

Date de publication : Mars 2017

Produit : INOmax DS<sub>IR</sub><sup>®</sup>, INOmax DS<sub>IR</sub><sup>®</sup> Plus

Priorité : Basse

INOmax DS<sub>IR</sub><sup>®</sup> Plus MRI, INOflo DS et INOvent

Parties concernées : Pièces à usage unique (parties jetables)

Classification : Information à distribuer

Objet : **Réutilisation de dispositifs à usage unique (pièces et/ou accessoires jetables)**

---

**AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de reconditionner ou réutiliser les dispositifs à usage unique. Cela peut créer un risque de contamination croisée, une altération de la fonctionnalité et une bio-incompatibilité.**

L'étiquette de l'emballage d'un dispositif classé comme étant à usage unique porte le symbole suivant :



Un dispositif à usage unique est destiné à être utilisé une seule fois ou sur un seul patient au cours d'une unique procédure. Ne pas réutiliser. Les dispositifs à usage unique ne sont pas conçus pour être reconditionnés et réutilisés, même chez le même patient.

Reconditionner un dispositif à usage unique peut entraîner les situations non sécuritaires suivantes :

- Contamination croisée due à l'impossibilité de nettoyer et décontaminer en raison de la conception du dispositif.
- Fonctionnalité compromise par une défaillance du dispositif liée au reconditionnement ou à sa réutilisation en raison de la fatigue, de l'altération ou de l'effritement des matériaux, sources de lésions potentielles du patient.
- Bio-incompatibilité due à des résidus/toxines provenant des agents de décontamination chimique restant sur des matériaux pouvant absorber les produits chimiques.

Choisir de reconditionner ou réutiliser un dispositif à usage unique peut avoir des répercussions sur les performances et la sécurité d'INOmax DS<sub>IR</sub>, INOmax DS<sub>IR</sub> Plus, INOmax DS<sub>IR</sub> Plus IRM, INOflo DS et INOvent.

Veuillez communiquer avec le responsable pour votre pays ou en appelant le 1-877-566-9466 (Amérique du Nord) pour obtenir une assistance technique concernant les dispositifs ci-dessus.

Mallinckrodt Manufacturing LLC  
6603 Femrite Drive,  
Madison, WI 53718-6801 États-Unis

Mallinckrodt, la marque « M » et le logo de Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques déposées de Mallinckrodt. D'autres marques sont des marques commerciales d'une entreprise de Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs.  
© 2017 Mallinckrodt